



Colclick®

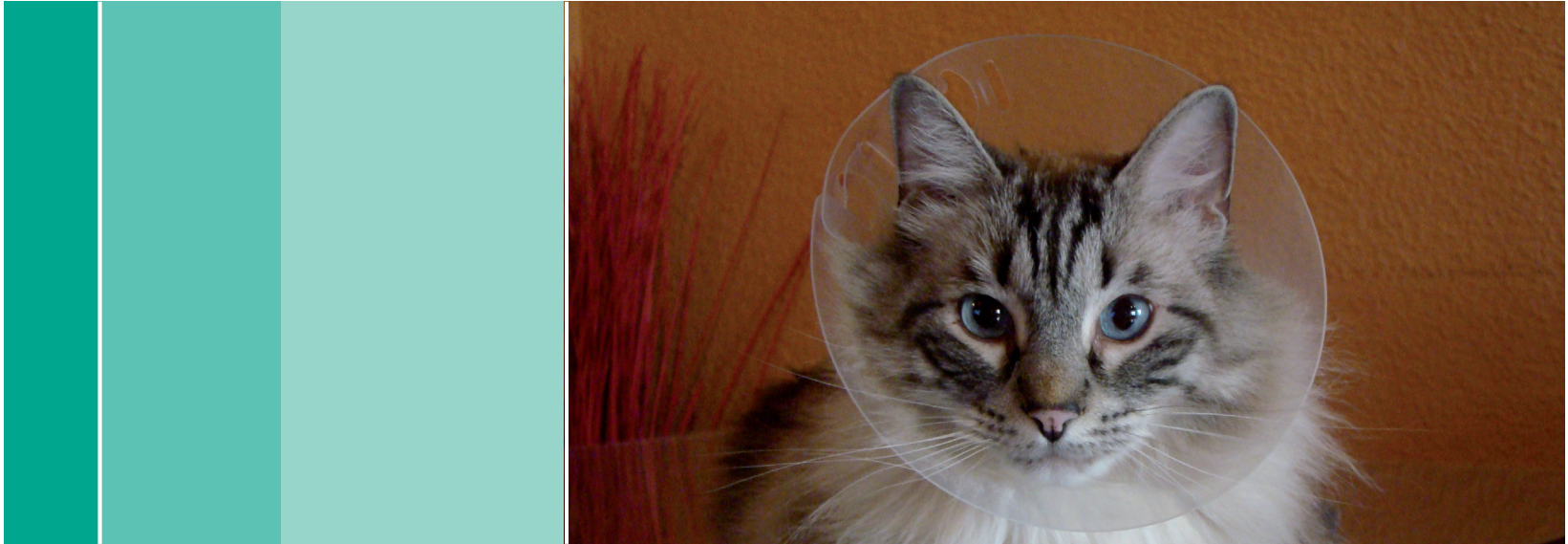




El collar isabelino de B. Braun

Instrucciones para la colocación

- Colocación muy fácil
- flexible
- resistente a los golpes
- semitransparente.

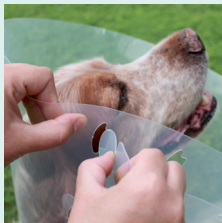

- Introducir las pestañas laterales de FUERA hacia DENTRO y que se escuche el "click" de su anclaje.
- Posteriormente pasar la pestaña por el anclaje de seguridad como muestra la fotografía.

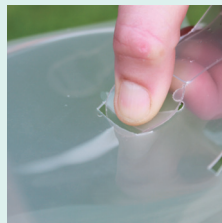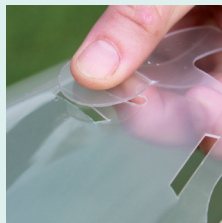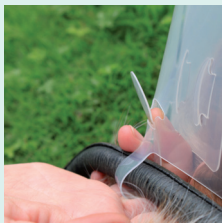

- Introducir las pestañas de la zona del cuello de DENTRO hacia FUERA y que se escuche el "click" de su anclaje.
- Posteriormente pasar la pestaña por el anclaje de seguridad como muestra la fotografía.

Referencia	Artículo	Uds.
CC0075	Colclick 7,5	10
CC0100	Colclick 10	10
CC0125	Colclick 12,5	10
CC0150	Colclick 15	10
CC0200	Colclick 20	10
CC0250	Colclick 25	10
CC0300	Colclick 30	10
472727	Colgador Colclick	1